




Hoofdmaatje

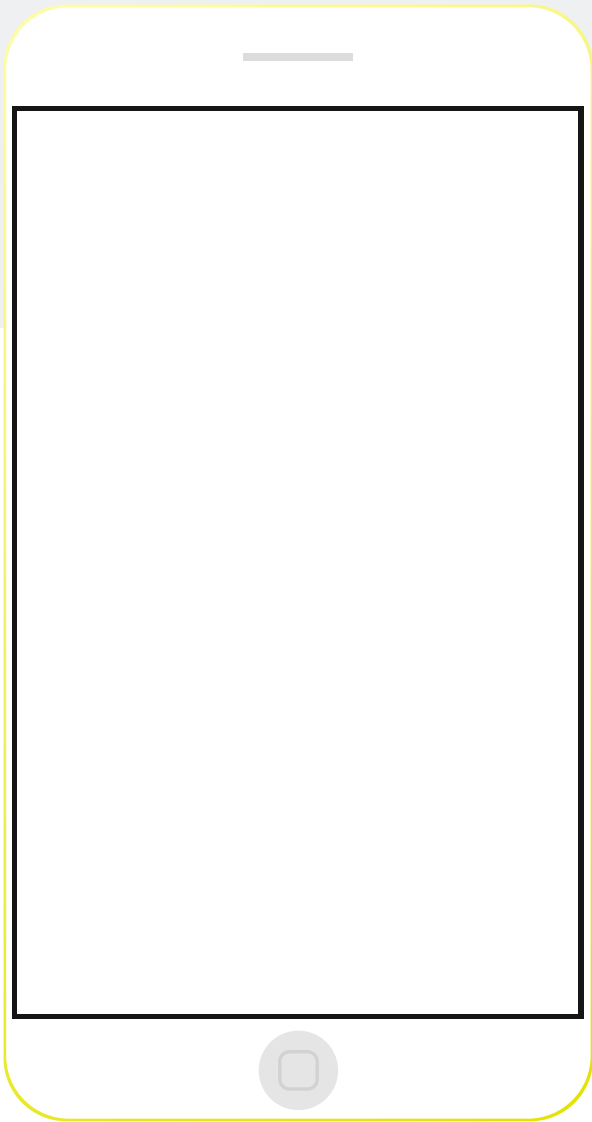


Manual

Handleiding

ALGEMEEN | NEDERLANDS

OVERZICHT: WERKING HOOFDMAATJE

- 1 Schrijf u in op Hoofdmaatje.nl
- 2 De foto, wat moet erop staan?
- 3 Maak een foto
- 4 Verstuur de foto via de Siilo app
- 5 Ontvang het resultaat

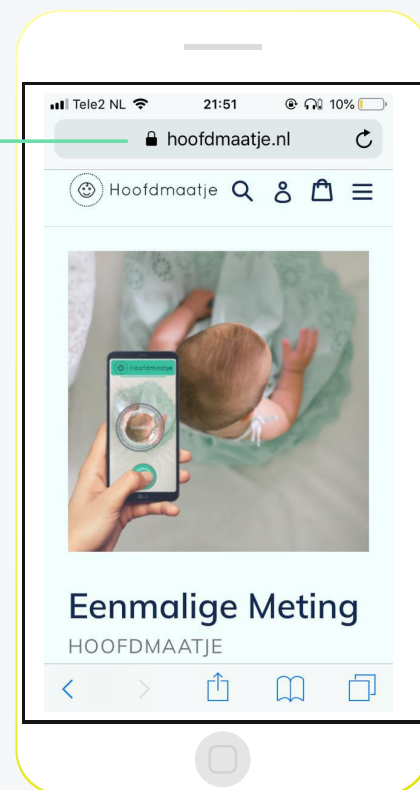

2

DE FOTO, WAT MOET EROP STAAN?

De foto wordt van de bovenzijde van het hoofdje gemaakt. In de foto moeten de volgende anatomische punten zichtbaar zijn:

DE NEUS

Het puntje van de neus



De neus moet op de foto zichtbaar zijn. Alleen het neus puntje.

DE OREN

De puntjes van de oren



Puntje van beide oren moet zichtbaar zijn.

DE CONTOUREN

De schedel omtrek



De contouren moeten duidelijk afsteken tegen de achtergrond.



Maak een foto

3

MAAK EEN FOTO


Voordat u een foto neemt, let op de positionering van uw mobiel:

- Zorg dat er minimaal 60 cm tussen het hoofdje en uw mobiel zit.
- Houd uw toestel op dezelfde hoogte als het hoofdje.

Tip - Zijn de anatomische punten niet zichtbaar? Vergroot dan de afstand tussen uw mobiel en het hoofdje.

- Open de camera op uw mobiel
- Zet de flits aan
- Zoom in op het hoofdje
- Stel scherp op het hoofdje (dit kan moeilijk gaan door het bewegen van de baby)
- **Maak een foto!**


Gebruikerservaring - 'Het maken van een geschikte foto is even wennen, maar na een aantal keer gaat het veel makkelijker en is het binnen 2 minuten gedaan'

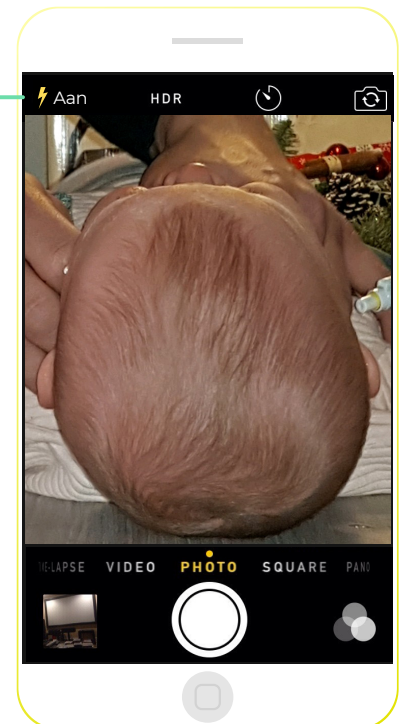

Hulpmiddelen - worden verzonden bij activatie van Hoofdmaatje.

Bestaande uit:

- Een buisverband voor baby's met veel haar. Trek het buisverband over het hoofdje maar laat de oren vrij. Leg een knoopje in het uiteinde.
- Schuimrubbers voor diep liggende oren. Achter de oren plaatsen waardoor de oren lichtjes naar buiten worden gedrukt.

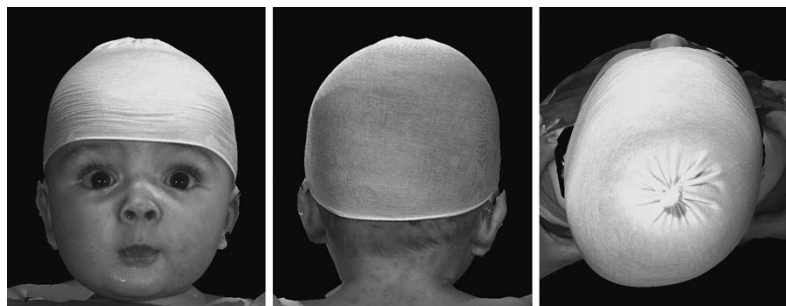

Verstuur de foto

4

VERSTUUR DE FOTO VIA DE SIILO APP


Om eenvoudig én veilig foto's naar Hoofdmaatje te sturen gebruiken wij de app Siilo. Dit is een gratis messenger voor professionals in de zorg.

- Nog geen Siilo account? Download de Siilo app in de app-store of google-play store.
- Na uw aanmelding wordt er een gesprek gestart tussen u en een werknemer van Hoofdmaatje. In dit gesprek wordt een Casus aangemaakt.
- Deze werknemer begeleidt u persoonlijk bij de simpele stappen om de foto's te uploaden in een casus.
- Na 30 dagen worden de foto's automatisch uit de app verwijderd.



5

ONTVANG HET RESULTAAT

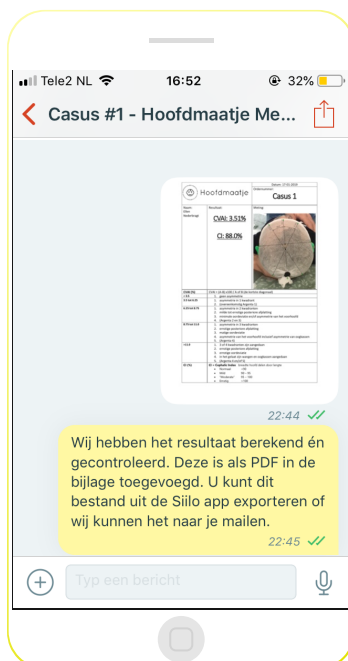

U ontvangt het resultaat van de meting binnen 48 uur. Het resultaat inclusief de meting wordt door de werknemer in de Siilo app naar u toegestuurd. De uitslag komt in de vorm van een CVAI en CI.

Hoofdmaatje werkt volgens Cranial Vault Index methode (CVAI). De CVAI is een internationaal breed gedragen en goed geaccepteerde methode. Op onze site vindt u meer informatie over de norm en de methode.

